

MASCARILLA HIGIÉNICA REUTILIZABLE

(UNE 0065-2020)

INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN



Lávese las manos con agua y jabón o solución hidroalcohólica.



Sostener mascarilla y ajustar las gomas a las orejas.



Bajar parte inferior a la barbilla y ajustar a la nariz.

TALLA

M



L



Una vez ajustada, **NO TOCAR LA MASCARILLA CON LAS MANOS.**

Si tuviese que hacerlo, lávese antes las manos o aplíquese hidroalcohol.

RETIRADA

- 1.- Retirar la mascarilla sin tocar la parte frontal exterior.
- 2.- Desechar la mascarilla si ya ha superado los ciclos de lavado o lavar en la lavadora directamente, sin mezclar con otras prendas.
- 3.- Lavarse las manos con agua y jabón o usar una solución hidroalcohólica.

LAVADOS (80 Lavados) FILTRADO >90%

Lavar sin utilizar productos que dañen los

materiales. Evitar productos que dejen olores. Lavar a 60°. Evitar ambientes que puedan contaminar durante el secado de la mascarilla. No utilizar HÚMEDA.

INSPECCIÓN VISUAL

Si después del lavado se detecta algún daño, por seguridad, desechar la mascarilla.

****DESECHAR EN DOBLE BOLSA.**

RECOMENDACIÓN DE USO

No colocar en posición de espera en la frente o en la barbilla.

Sustituir por otro si se humedece.

RECUERDE: LOS NIÑOS DEBEN HACERLO BAJO SUPERVISIÓN DE UN ADULTO.

RECUERDE: las medidas de protección colectivas son prioritarias sobre las medidas de protección individual.

ADVERTENCIA. Este dispositivo no es un producto sanitario en el sentido de la Directiva 93/42 o del Reglamento UE/2017/745, ni un EPI en el sentido del Reglamento UE/2016/425. Por motivos de higiene, no se admite la devolución de este producto.

Composición: Neopreno hidrofugado y antibacterian- 92% polyester -8% elastane forro poliéster-algodón 50%-50% Certificado nº: C-13837 C-20346

ARTESANIA NAVA S.L. B45200516

www.artesianianava.com

NAVA



